



Instrucciones Kit Recall

Recordatorio de blanqueamiento en clínica

72 H. SIGUIENTES AL BLANQUEAMIENTO

Alimentos perjudiciales durante:
Tabaco
Café
Moras
Fresas
Espinacas
Tomate frito
Mortadela
Frambuesa
Tinta de
calamar
Granadas
Sándia
Guisos con
Vino tinto
Sandía
Lúvas
Vino
rosado
Mosto
Alcachofa
Cacao
Cualquier
alimento de
fuerte
coloración,
Cerezas
Remolacha
Zanahoria
Broccoli

GENTRO ESPECIALIZADO:

Gita: / /
Tél: / /

ADVERTENCIAS ANTES DE REALIZAR EL BLANQUEAMIENTO

1. QuickWhite, usado correctamente, blanqueará el tinte de las dentaduras con un notable resultado. De cualquier modo debe evitar crear falsas expectativas o garantías al paciente acerca del resultado.
2. Los pacientes con dientes amarillo-marrones oscuros tienden a responder al tratamiento mejor que los de color gris o rojizo.
3. Aunque no existen datos que reflejen daño para el diente, es importante que el paciente sea informado con prudencia acerca de la posible sensibilidad durante las primeras 24 h. Dichas molestias desaparecerán en unos 2 días. A los pacientes más propensos se les puede aplicar fluor o recomendar algún analgésico.
4. Realizar una limpieza dental una semana antes del tratamiento.
5. No usar el gel una vez que pasen 30 min. aplicar vitamina E en la zona afectada.
6. El tratamiento de caries, así como otras enfermedades, deben ser realizados antes del blanqueamiento. Estos tratamientos, si son en dientes visibles, deben hacerse de forma provisional, ya que la obturación definitiva se realizará 20 días después del blanqueamiento con el tono conseguido.
7. La protección gingival es esencial para evitar la irritación de la misma durante el tratamiento, por lo que es fundamental cubrir bien los cuellos descubiertos con 1 mm. de grosor sobre el margen gingival, así como cubrir los bordes incisivos desgastados y diastemas.
8. No exponer el contenido de los kits a luz excesiva. El peróxido de hidrógeno debe mantenerse refrigerado y sacar del frío 15 min. antes de realizar el tratamiento.
9. Si el gel entra en contacto con tejidos blandos, enjuagar inmediatamente con agua abundante y aplicar vitamina E en la zona afectada.

Dentibur 2003, S.L., Avda. de la Palma 48, Entreplante, Of. 5, 29003 Málaga - Tel. 952 04 05 02 - Fax. 952 04 00 57

INSTRUCCIONES TRATAMIENTO RECORDATORIO EN CLINICA

Usar en casos de revisión anual para recuperar el tono, como refuerzo de un tratamiento completo en clínica para mejorar el resultado, casos de tinción muy suave, o cuando el paciente ha consumido alimentos no recomendados tras el blanqueamiento.

1. Saque el bote de peróxido de hidrógeno del frigorífico una hora antes de comenzar el tratamiento.

2. Examine los dientes y compruebe cual es el tono inicial del diente antes de la aplicación del tratamiento con la guía VITA ordenada de la siguiente manera: B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4, C4.



3. Tomamos registro fotográfico del tono inicial.

6. Mezclar el peróxido de hidrógeno con los polvos fotoactivadores hasta obtener una suave pasta, con una consistencia de gel, cómoda para trabajar.

Aplique el producto al diente en la cara vestibular con un grosor de capa como de unos 2 mm.



7. Si usa el sistema LumaCool, coloque la cabeza de la lámpara a menos de 2 cm de los labios. Ajuste el tiempo y deje activar el producto durante los 10 minutos del ciclo.

Si no usa un sistema de doble arcada, comience el ciclo de 10 minutos con su lámpara de polimerizar a unos 6-7 mm de la superficie del diente cambiando cada 3 segundos de diente durante los 10 min del ciclo.

4. Coloque el retractor labial. Dé un pulido con la pasta de piedra pómez incluida en el kit para eliminar posibles impurezas. Nunca usar pastas con glicerina, gomas o aceites



5. Seque la dentadura y la encía con aire comprimido y seguidamente aplique la protección de la encía cubriendo completamente todos los tejidos blandos, cubriendo el surco gingival e incluso la dentina en cuellos descubiertos. Polimerizar la resina protectora.

Precaución: una sobreexposición de la resina a la luz puede causar aumento de calor en la encía.

8. Una vez concluido el ciclo retiramos el gel aspirando pieza a pieza cuidadosamente.



10. Para terminar damos el toque final aplicando pasta de diamante LUMINESCENCE.



11. Comprobamos la nueva tonalidad del diente y tomamos registro fotográfico de nuevo para comparar con el tono inicial.

12. En caso de verlo necesario podemos entregar una o varias jeringas para el mantenimiento en casa, así como las férulas.

INSTRUCCIONES TRATAMIENTO EN CASA



1. El paciente en su casa, debe cepillarse los dientes y pasar la seda dental antes de su uso.

2. Retirar el tapón blanco de la jeringa y poner una de las puntas incluidas.



(Las puntas son reutilizables por lo que deben ser guardadas para el siguiente día)

3. Realizar el vertido del producto sobre la cara vestibular de la férula (la que va a

estar en contacto con la superficie dental a blanquear).

4. Repetir lo mismo con la otra férula para la otra arcada.



5. Colocar las férulas sin morder excesivamente. Evitar tragar el producto



6. Tras 30-40 min. con las férulas puestas quitar y enjuagar con agua abundante.

7. Repetir el proceso diariamente hasta agotar el producto. Aplicar justo antes de ir a dormir.